

La terapia in pochi e semplici passi

01



Collegare il cavo di alimentazione

02



Collegare 1 o 2 diffusori a seconda del trattamento scelto

03



Accendere il dispositivo con l'interruttore posto sul retro

04



Scegliere il trattamento con i tasti UP & DWN

05



Confermare il trattamento con il tasto ENTER

06



Avviare il trattamento con il tasto START/STOP

PRODOTTO ITALIANO CERTIFICATO



È un dispositivo medico CE.
L'apparecchio non deve essere utilizzato nei pazienti portatori di pacemaker e nelle donne in gravidanza, nonché in presenza di patologie infettive della parte da trattare.
Se i sintomi persistono consultare il medico.

LED SpA
www.led.it

DP383A PRINTED IN ITALY © 2013 LED SpA. Dati, descrizioni, dimensioni, pesi e illustrazioni sono puramente indicativi. Il produttore si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



Therafield
Magnetoterapia contro
i dolori più comuni

Sentirsi bene... ...non avere dolori

Breve storia della magnetoterapia

La magnetoterapia è una terapia che si fonda sul concetto di rigenerazione della salute. La sua storia è antichissima ed è noto che i primi magneti in ferro furono fabbricati dai cinesi. Documenti relativi all'utilizzo dei magneti in medicina risalgono addirittura a 2000 anni prima di Cristo indicano il loro impiego per problematiche legate alla fertilità ed ai reumatismi, già noti a quel tempo.


Come funziona la magnetoterapia:

L'azione della magnetoterapia sull'organismo avviene in profondità, o meglio, a livello cellulare: ripolarizza le cellule e riequilibra la permeabilità della membrana. Gli ioni presenti all'interno ed all'esterno della cellula vengono stimolati affinché



si ristabilisca la corretta differenza di potenziale tra membrana e nucleo cellulare. Ne consegue un aumento significativo dell'apporto di ossigeno alle cellule ed una migliore vascolarizzazione, che favorisce l'attività biologica cellulare in modo naturale.

Grazie alla magnetoterapia si ottengono risultati nei seguenti casi:

- Patologie di tipo infiammatorio quali artrosi, nevralgie articolari, strappi muscolari, ecc.;
- Malattie reumatiche;
- Patologie osteoarticolari quali tendinite, epicondilitis, borsite, periartrite, metatarsalgie, gonoartrosi, ecc.;
- Trattamento delle fratture durante e dopo l'ingessatura;
- Traumi recenti e ritardi di consolidamento.

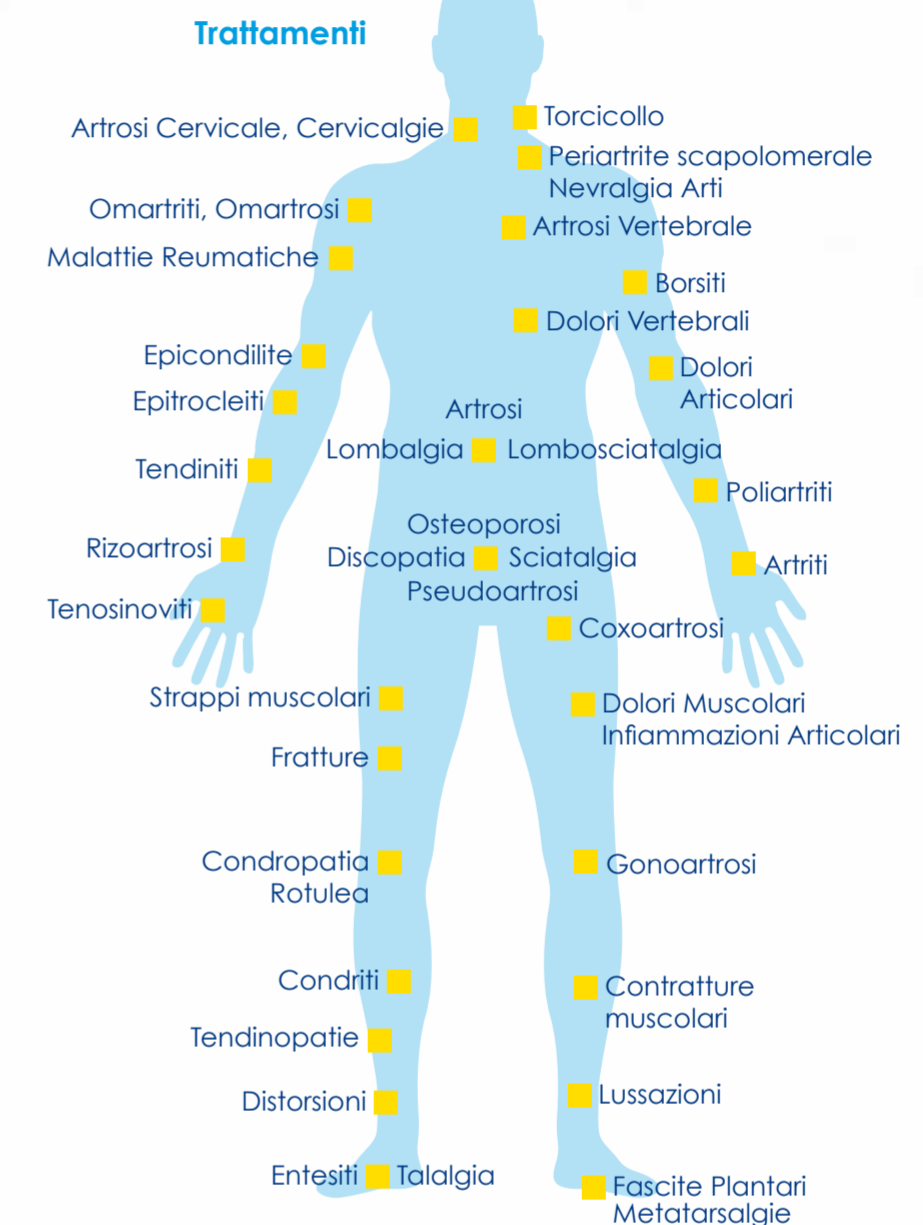

Semplice da utilizzare...

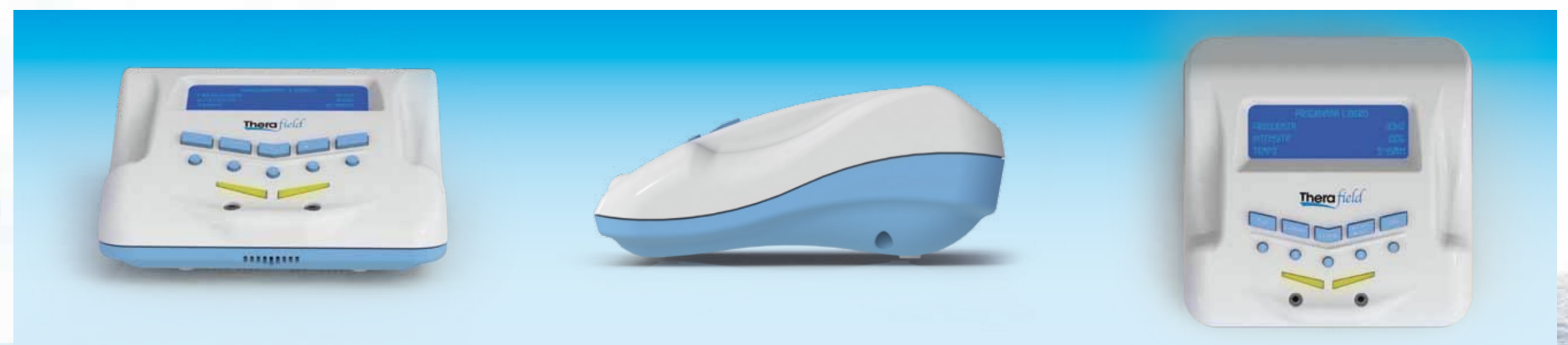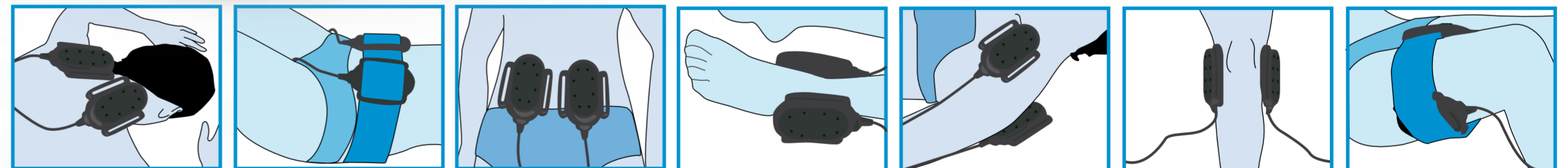

Contenuto confezione



1 Valigia per il trasporto del dispositivo



1 Therafield




2 Solenoidi



1 cavo di alimentazione



1 manuale d'istruzioni

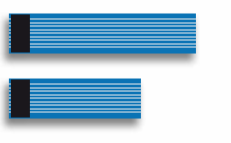

2 fascie elastiche per il fissaggio